

# SYSTÉM PROSTŘEDKŮ PRO IMOBILNÍ PACIENTY

## AQVITOX - D

### PROSTŘEDEK NA OŠETŘENÍ RAN

Aqvitox - D je superoxidovaný roztok pro ošetření akutních i chronických ran, dekubitů, odřenin, popálenin a ulcerací jiné etiologie.

Efektivní podpora hojení, snížení osídlení nežádoucími mikroorganismy, odstranění zánětu.

#### Novinka



### Superoxidovaný roztok

#### Rychlý a účinný

- významně podporuje proces hojení, vytváří přirozeně vlhké prostředí ve spodině rány
- řádově v minutách kvantitativně terminuje mikroby, včetně rezistentních kmenů, kvasinky, viry a spóry

#### Bezpečný

- nepoškozuje zdravou tkáň, je netoxický a nedráždí kůži a sliznice, nevede k rezistenci mikrobu
- nezpůsobuje alergické reakce, vhodný pro použití u těhotných žen i u dětí

#### Eliminuje zápach rány

#### Snadné použití, skladování a likvidace

- ihned k použití - nemíchá se, nefedí se, nevyžaduje žádná aktivační činidla
- je kompatibilní s obvazovým materiálem a jinými používanými materiály
- nevyžaduje žádné speciální zacházení, skladování ani likvidaci je ekologicky bezpečný a šetrný, jeho použitím nevzniká nebezpečný odpad

#### Použití:

K přímé aplikaci do otevřené rány. Díky kontrolovaným reaktivním kyslíkovým radikálům je vysoce aktivní, a tím velmi účinný. Výrazně snižuje mikrobiální zátěž, efektivně potlačuje krvácení, pomáhá vytvořit vlhké prostředí, a tím umožňuje rozvinout vlastní proces hojení. Je bez barvy a bez zápachu a není parfémován.

Používá se k oplachu, ponoru, postřiku, výplachu a obkladům rány. Doporučená aplikace 3-4x denně. Lze použít v kombinaci s jinou terapií, či jako monoterapie.

Působí selektivně pouze na patogenní mikroorganismy, a nepoškozuje zdravé tkáňové buňky.

Likviduje bakterie včetně rezistentních kmenů MRSA a VRE, kvasinky, viry včetně HIV, ale i spory.

Doporučená doba působení přípravku je minimálně 10 minut.

#### Složení přípravku:

Voda 99,8%, kyselina chlorná 0,03%, chlornan sodný 0,03%, chlordioxid 0,0001%, chlorid sodný 0,1%

#### Balení:

- 100 ml láhev s aplikační tryskou
- 500 ml láhev s uzávěrem - tryska
- 500 ml láhev s mechanickým rozprašovačem (aplikace postříkem)
- 5l kanystr

Aqvitox - D je registrovaný jako zdravotnický prostředek třídy II b, pod registračním číslem ŠUKL : 2009/00042.

Bez lékařského předpisu.

#### Důležité upozornění:

Skladujte do data uvedeném na obalu.

Skladujte při teplotě 5 - 30 °C  
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

Aqvitox - D má 6 měsíční expiraci.



EGO Zlín, spol. s r. o. (Ltd)

U pekárny 438, 763 14 Zlín, Czech Republic

sekretariat@egozlin.cz, www.egozlin.cz

phone: +420 577 100 031, fax: +420 577 914 363

NCAGE: 9D97G



www.egozlin.cz